

### 3. ASSEMBLAGE DE VOTRE SENSEUR i-PRESSURE™

**3.1 :** Installation des PILES (AA) tel que spécifiée à la section 8.1. Suivre les indications de positionnement (+/-) situées à l'intérieur du compartiment lors de la mise en place des piles. S'assurer que le ruban rouge servant d'EXTRACTEUR est positionné pour un enlèvement facile des piles, tel que montré sur l'image ci-dessous. Réinstaller ensuite les piles et refermer le couvercle.



**Extracteur**



**1<sup>ère</sup> pile**



**2<sup>ème</sup> pile**

**3.2 :** OUVRIR complètement la valve d'inflation du coussin en tournant dans le sens anti-horaire.



**Ouvrir valve**

**3.3 :** OUVRIR l'adaptateur de la valve en dévissant partiellement l'écrou. CONNECTER le senseur au coussin en insérant la valve du coussin jusqu'au fond de l'adaptateur à 90 degrés. Tenir les deux pièces ensemble et SERRER l'écrou en tournant dans le sens horaire. Valider la retenue au coussin et s'assurer que l'angle de l'adaptateur est parallèle au coussin.



**Dévisser**



**Connecter**



**Serrer**

### 3.4: Assemblage adaptateur

- Assembler l'adaptateur selon l'ordre de la figure ci-dessous.
- Attention de bien assembler chaque pièce selon leur orientation indiquée sur la figure ci-dessous.
- La partie 4 se différencie de la partie 5 du fait qu'elle est peinte en blanc.



- 3.5: ATTACHER l'unité au cadre de la chaise en utilisant les bandes fournies à l'intérieur de l'emballage ainsi que les poignées situées sur les côtés de l'unité. Les bandes peuvent être séparées en deux parties afin de les fixer en double.**



**UNE bande de VELCRO®**



**DEUX bandes de VELCRO®**

- 3.6: Le capteur i-PRESSURE™ doit toujours demeurer accessible à l'utilisateur et le professionnel de la santé afin de faciliter le contrôle auditif et/ou visuel de l'appareil. L'accès à l'ouverture et à la fermeture de la valve d'inflation est nécessaire. Ni l'appareil ni les tuyaux ne devraient être laissés pendants, emmêlés ou tirés, ni devenir potentiellement dangereux par l'emplacement choisi.**

**⚠ ATTENTION!** Ne pas utiliser l'appareil comme une poignée pour déplacer le coussin.

**⚠ ATTENTION!** S'assurer que les tuyaux ne sont pas pendants, emmêlés, pliés, pincés ou tordus. Choisissez un emplacement sécuritaire pour placer l'appareil.