

4. OPÉRATION ET RÉGLAGE

Maintenant que vous avez complété l'assemblage de votre i-PRESSURE™, vous êtes prêts à régler votre nouveau senseur et à commencer à vous en servir.

⚠ ATTENTION! La première installation et la première calibration doivent être effectuées par votre professionnel de la santé.

4.1: OUVRIR/ FERMER l'unité

Appuyer et relâcher la cible du bouton pour ouvrir l'unité

- Un son d'ouverture sera entendu
- Les DELs clignotent en cascade

Appuyer et relâcher la cible du bouton pour fermer l'unité

- Un son de fermeture sera entendu
- Les DELs clignotent en cascade



OUVERTURE AUTOMATIQUE de l'unité. Lorsque fermée, l'unité détecte qu'une personne s'est assise sur le coussin et, par conséquent, déclenche l'ouverture de l'unité.

4.2: GONFLER sans que l'utilisateur soit assis sur le coussin, puis positionner et ajuster le coussin conformément aux recommandations du fabricant. Finalement, utiliser la pompe installée sur la valve d'inflation.

NOTE: Le gonflage du coussin doit être fait après l'installation de la valve sur le coussin.

4.3 : ENREGISTRER le réglage de l'utilisateur/ thérapeute

Une fois votre coussin convenablement gonflé et ajusté par votre professionnel de la santé, il est temps d'enregistrer le réglage de votre coussin. Suivre les quatre étapes suivantes pour enregistrer votre propre calibration :

OUVRIR l'unité

Appuyer et tenir la cible du bouton jusqu'à 1 bip, relâcher le bouton

Appuyer et tenir la cible du bouton jusqu'à 2 bips consécutifs, relâcher le bouton

- Les DELs vont clignoter séquentiellement : ROUGE, VERT, ROUGE

Appuyer et maintenir le bouton jusqu'à ce qu'un son de confirmation soit entendu, ce qui enregistre la pression.

NOTE: L'enregistrement du réglage individuel doit être fait pendant que l'utilisateur est assis convenablement sur le coussin.



ATTENTION! L'unité sortira automatiquement du mode calibration après 60 secondes. Un son d'erreur sera alors entendu qui signifie que la calibration n'est pas enregistrée et demeurera inchangée.



ATTENTION! Assurez-vous que l'enregistrement du réglage individuel a été adéquatement effectué.
